

FeNObreath™ — Náústek

Integrovaný filtr
pro kontrolu
infekce




ASCO
MED s.r.o.

Technická Specifikace

Rozměry	Approx. 180 x 25 x 15 mm
Váha	Approx. 11g
Materiál	Polypropylene

FeNObreath™ náústek byl vyroben pro výhradní užívání s FeNObreath™ přenosným analyzátozem vydechaného oxidu dusnatého a je doporučen k užívání ve funkčních laboratořích, nemocnicích, privátních praxích i při oficiálních screeningových studiích. Náústek umožňuje jednoduché, výkonné a nízkonákladové měření vydechaného oxidu dusnatého FeNO.

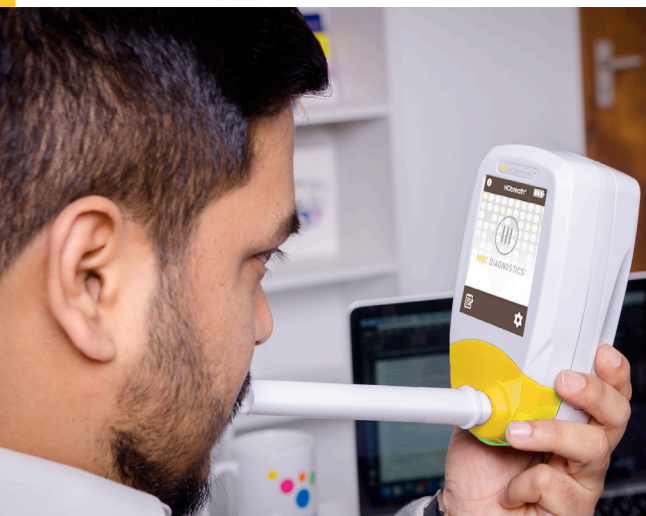

Varování: Náústky jsou nepřenositelné mezi jednotlivými pacienty. **Opakované používání jedním pacientem v delším časovém intervalu může ovlivnit správnost výsledků** a zvýšit riziko přenosu infekce. Náústek by měl být po použití zlikvidován v souladu s místními předpisy.

Náústky jsou plně recyklovatelné.



Náústek obsahuje integrovaný filtr pro kontrolu infekce, který odstraňuje a zachycuje > 98 % vzdušných bakterií a > 96 % virů¹. Náústek FeNObreath™ může být opakovaně (až 15x) použit jedním pacientem během jedné klinické návštěvy. Stejný náústek by **NIKDY** nemělo používat více pacientů. **Opakované použití náústku mezi pacienty může zvýšit riziko přenosu infekce.**

Náústek FeNObreath™ nesmí být za žádných okolností umýván ani sterilizován. Jakýkoli takovýto pokus může poškodit filtr, což **může ovlivnit správnost výsledků** a zvýšit riziko přenosu infekce.

VAROVÁNÍ: Dechové testy lze provádět pouze s příslušenstvím schváleným výrobcem. Pokud tak neučiníte, může to vést k nesprávným výsledkům.

POZNÁMKA: Další informace o předcházení riziku infekce naleznete v doporučených postupech MGC Diagnostics Corporation.

POZNÁMKA: Nepokoušejte se zařízení nijak upravovat a ani nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Při jakémkoli takovémto pokusu zrušíte platnost záruky a můžete ohrozit bezpečnost zařízení.



Reference:

1. Public Health England. An Evaluation of Filtration Efficiencies Against Bacterial and Viral Aerosol Challenges Report No. 18/040. London: Public Health England; 2019.

Distribuce: MGC Diagnostics Corporation a její dceřinná společnost Medisoft SA, 1 Route de la Voie Cuvrêe 5503 Sorinnes, Belgique
E-mail : info@medisoft.be | Web: www.medisoft.be
Tel: +32(0) 82 22 30 20 E-mail: info@mgcdiagnostics.com
Web: www.mgcdiagnostics.com

Distribuce pro ČR: ASCO-MED, spol. s r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6
E-mail : asco@ascomed.cz | Web: www.asco-med.cz
Tel: +420 233 313 852



Výrobce: Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA Velká Británie
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
E-mail: ask@bedfont.com | Web: www.bedfont.com

Vydání 1 - 7/2019, Část: MKTS14_MGC
Bedfont® Scientific Limited si vyhrazuje právo změnit
nebo aktualizovat návod k použití bez předchozího
upozornění.
Registrováno ve Velké Británii: Registrační číslo: 1289798

