

Příručka pro údržbu a kontrolu infekce pro monitor a nabíjecí stanici FeNObreath



Prosím přečtěte tato doporučení před začátkem užívání zařízení

Kontrola infekce

Před a po užití zařízení je doporučeno umýt ruce a to jak u zdravotnického personálu, tak i u pacienta. Monitor FeNObreath je vybaven SteirTouch antimikrobiální technologií pro zvýšení kontroly infekce.

Náústek FeNObreath obsahuje integrovaný filtr pro kontrolu infekce, který zachytí a odstraní více než 98 % vzdušných bakterií a více než 96 % virů.

FeNObreath náústek může být opakovaně používán u stejného pacienta. Stejný náústek nemůže být **NIKDY** používán u více pacientů. Používání náústku více pacienty by mohlo zvýšit riziko infekce.

FeNObreath náústek nesmí být za žádných okolností umýván a sterilizován. Každý takový pokus může poškodit filtr, což může vyústit v chybný výsledek a zvýšit riziko infekce.

Doporučuje se, aby pacient nasadil a poté sundal z přístroje svůj náústek osobně.

Zatímco pacient vydechuje do přístroje, neměl by zdravotnický personál clonit ve výhledu na monitor.

Údržba

FeNObreath by mělo být kalibrováno jednou za rok (kontaktujte firmu ASCO-MED, spol. s r. o.), jakmile se vám na přístroji objeví upozornění o kalibraci.

- ☉ NO scrubber by měl být vyměněn rovněž 1 za rok.
- ☉ NO senzor by měl být vyměněn jednou za 5 let.
- ☉ Cartridge by měla být rovněž vyměněna po 5 letech.
- ☉ Doporučuje se nenechat baterie úplně vybit.

Čištění

Doporučuje se otírat externí povrch přístroje speciální tkaninou obsahující antimikrobiální složku. Přístroj by měl být otřen před prvním použitím a poté po každém pacientovi.

NIKDY nepoužívejte desinfekční prostředky obsahující alkohol a organická rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození senzoru přístroje.

Za žádných okolností by přístroj neměl být ponořen ani oplachován tekutinou.

FeNObreath náústek je určen pro jednoho pacienta a měl by být zlikvidován podle místních doporučení týkajících se nakládání s odpady. **NIKDY** se nepokoušejte omývat ani sterilizovat náústek, protože by mohlo dojít k poškození filtru, což může vyústit v chybný výsledek a zvýšit riziko infekce.

Kontaktujte nás v případě zájmu o náústky nebo čistící prostředky.

ASCO MED s.r.o.

Distributor pro ČR: ASCO-MED, spol. s r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6

www.asco-med.cz | asco@asco-med.cz | +420 233 313 578